

Apresentamos a seguir as instruções para a coleta e envio de amostras de sangue para o FOUNDATION ACT®, a fim de assegurar a realização bem-sucedida do perfil genômico e detecção de todas as classes das possíveis alterações genômicas.



Instruções de coleta e envio das amostras de sangue

1 Use apenas os tubos encaminhados pelo FOUNDATION ACT®!

Outros tubos não serão aceitos.

2 Confirme se o líquido está claro e sem estar turvo e sem cristais.


3 Colete dois tubos de sangue total (8.5mL por tubo).

- Evite o refluxo: os tubos contêm aditivos químicos e é importante evitar o refluxo para o paciente.
- Recolha espécimes por punção venosa de acordo com CLSI H3-A6.
- Encha os tubos completamente (8.5mL por tubo).

4 Remova o tubo do adaptador e misture imediatamente mexendo com leve inversão* por 8 a 10 vezes.

Misturar de forma inadequada ou com atraso pode levar a resultados imprecisos.

* Uma inversão significa um giro do pulso de 180 ° e de volta (figura abaixo).

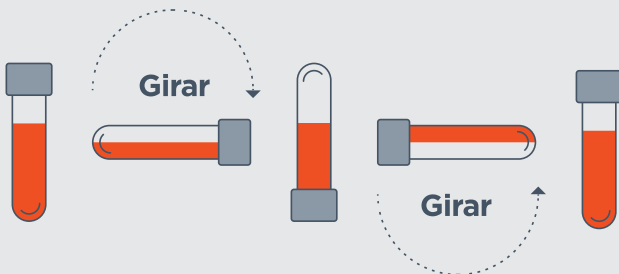

5 Documentos para envio da amostra:

- Amostra de sangue: confirme que cada tubo é rotulado com as etiquetas enviadas por nós; data de coleta e 2 números identificadores únicos do paciente (rótulo incluído no kit);
- Formulário de requisição preenchido (CRF) (lembre-se de incluir o diagnóstico do paciente);
- Relatórios médicos disponíveis; documentos que acompanham o Kit FOUNDATION ACT®;
- Cópias de relatórios de patologia e / ou outra documentação clínica.

6 Providencie o envio preferencialmente no mesmo dia da coleta. Não congelar ou refrigerar amostras de sangue.

A temperatura é importante. Mantenha a temperatura ambiente (6-37 ° C).

NÃO CONGELE.



CONCIERGE
FOUNDATION MEDICINE
0800 777 6244
brasil.foundation@roche.com



Para agendar o envio do material e mais informações sobre o teste FoundationACT®, entre em contato com nosso serviço CONCIERGE FOUNDATION MEDICINE: